



ottobock.

MySkin Myo

Anzieh- und Pflegehinweise

Quality for life

Anziehhilfe


Ihr MySkin Myo Prothesenüberzug ist aus Silikon gefertigt, einem Material, das nicht so leicht auf Stoffen und Kleidung gleitet. Die EasyFit Arm Anziehhilfe macht Ihnen das Anziehen leichter: Stülpen Sie sie einfach über Ihre Prothese und kleiden Sie sich dann wie gewohnt an. Wenn alles sitzt, ziehen Sie die Anziehhilfe am Band wieder aus dem Ärmel heraus. Die EasyFit Anziehhilfe können Sie über Ihren Orthopädietechniker beziehen.



- 1** Ziehen Sie die EasyFit Anziehhilfe über die Prothese.




- 2** Legen Sie das gewünschte Kleidungsstück an.

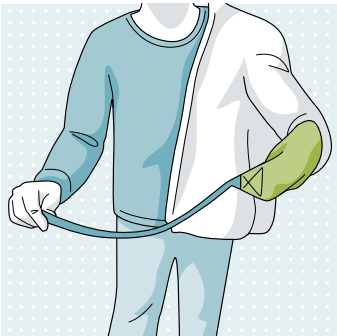

- 3** Ziehen Sie die Anziehhilfe am Band aus dem Ärmel heraus.

Reinigung und Pflege


Die regelmäßige Reinigung schützt Ihren MySkin Myo Prothesenüberzug vor dauerhaften Verschmutzungen z. B. durch Drucker-schwärze und Kugelschreiber. Außerdem werden Schäden frühzeitig erkannt und damit weitestgehend verhindert. Reinigen Sie Ihren Prothesenüberzug täglich mit einer pH-neutralen Seife z. B. DermaClean.

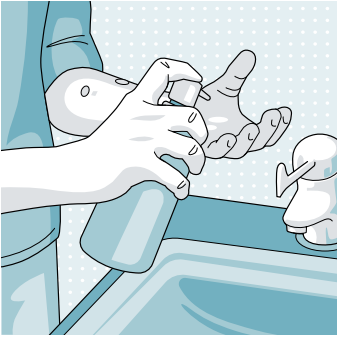

- 1 Entfernen Sie Verunreinigungen mit warmem Wasser und Seife.



- 2 Spülen Sie den Prothesenüberzug mit warmem Wasser ab, um alle Seifenreste rückstandsfrei zu entfernen.
Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser zwischen Prothesenüberzug und Prothesenschaft läuft!

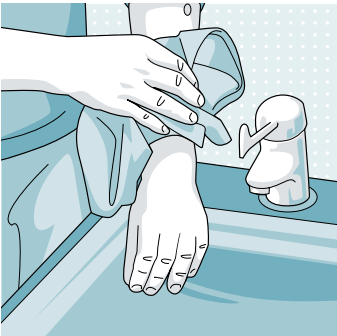

- 3 Trocknen Sie den Prothesenüberzug mit einem fusselfreien Tuch ab.

Kontrolle

Bitte prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob Ihr MySkin Myo Prothesenüberzug unbeschädigt und funktionstüchtig ist. Wenn sich Veränderungen im Material zeigen, besonders im Bereich der Hand und Fingerkuppen, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Orthopädie-Techniker in Verbindung. Lassen Sie Ihren Prothesenüberzug außerdem bei jedem Check Ihrer Prothesenhand mit überprüfen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit folgenden Substanzen und Gefahrenquellen, da sie den MySkin Myo Überzug schädigen können:

- Öl- und fetthaltigen Mitteln, Salben und Lotionen
- Aggressiven Reinigungsmitteln (z. B. Säuren, Laugen)
- Lösungsmitteln (z. B. Benzin, Verdünner)
- Stark färbenden Stoffen (z. B. Tinte, Farbstoffe)
- Hautschutzlotion DermaPrevent
- Offenes Feuer, Glut oder anderen Hitzequellen
- Spitzen und scharfkantigen Gegenständen, um Einschnitte in den Überzug zu vermeiden

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH

Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt

T +49 5527 848-3030 · F +49 5527 848-1585

iFab@ottobock.de · www.ottobock.de